

CS • POLYURETHANOVÁ SONDA S VODICÍM DRÁTEM/ODSÁVÁNÍM

Nasogastrická výživová sonda s portem pro dekompresi/Pouze pro enterální použití/Nebezpečí udušení; volné části/Vodící drát nikdy znovu nezavádějte do sondy, pokud z ní byl již uvolněn či vytažen.

Informace pro pacienta – výživové sondy Flocare® PUR, PURSOFT a NUTRISOFT s vodícím drátem/odsáváním

1. Co jsou výživové sondy Flocare® s odsáváním a k čemu se používají? Nasogastrické výživové sondy jsou určeny k podávání enterální výživy do žaludku. Tento výrobek je vybaven konektorem ENFit™ určeným k podávání enterální výživy a odsávacím portem určeným k odsávání žaludečního obsahu.

2. Upozornění a bezpečnostní opatření: Pouze pro enterální použití; nebezpečí udušení/volné části; po vyjmutí nepoužívejte opakovaně z důvodu rizika infekce a/nebo rizika nesprávného fungování výrobku; není povolena žádná úprava prostředků. Před použitím prostředku nebo v případě pochybností se poraďte s odborným zdravotnickým personálem. Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, která se vyskytla v souvislosti s tímto prostředkem, musí být oznámena společností Danone (Nutricia) a místnímu odpovědnému orgánu.


3. Jak se výrobek používá? Enterální výživa se podává konektorem označeným "FEEDING". Připojte sondu k setu nebo striktače pro podávání výživy s ENFit™ konektorem a začněte s podáváním výživy podle instrukcí odborného zdravotnického personálu.

Každodenní péče: Zvracení, dýchání, kašel nebo náhodné zatažení za sondu může způsobit posunutí sondy. Pokud k tomu dojde, tekutiny se mohou dostat do plic místo do žaludku. Z tohoto důvodu je třeba vždy kontrolovat umístění sondy způsobem, který vám vysvětlí ošetřující odborný zdravotnický personál. V případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte odborný zdravotnický personál a nikdy se nepokoušejte výživovou sondu znovu zavést. Sondu udržujte bez zbytků (výživy) a pravidelně čistěte konektor. Sondu proplachujte vodou před a po podání výživy nebo léků a minimálně každých 8 hodin, abyste předešli jejímu ucpaní. K proplachování používejte striktačku s minimálním objemem 20 ml. Nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu. V případě jakéhokoliv odporu postup přerušete a poraďte se s odborným zdravotnickým personálem.

4. Jak se používá odsávací port? Odsávací port s označením "A" **NELZE** použít k podávání enterální výživy. Během podávání výživy je třeba uzavřít svorku na odsávacím portu, aby se zabránilo náhodnému otevření krytky v důsledku zvýšeného tlaku při uzavření (obrázek 13). Při použití odsávacího portu je třeba uzavřít svorku přívodu výživy, aby se zabránilo nesprávnému toku (obrázek 14). V případě, že není podávána výživa a ani nedochází k odsávání, oba konektory, odsávací a ENFit™, mohou být uzavřeny připravenými krytkami a obě svorky zůstanou otevřené, aby se zabránilo poškození sondy (obrázek 15).

5. Jaké jsou možné komplikace? Může dojít k ucpaní sondy, podráždění okolí nosních dírek sondou, k nevolnosti, zvracení a aspiraci. V případě jakýchkoliv komplikací se poraďte s odborným zdravotnickým personálem.

6. Jak sondu vyjmout a zlikvidovat? Nasogastrickou výživovou sondu Flocare® se doporučuje používat po dobu <6 týdnů, aby se minimalizovalo riziko komplikací způsobených degradací materiálu či ucpaním sondy. Vyjmutí se vždy provádí pod lékařským dohledem.

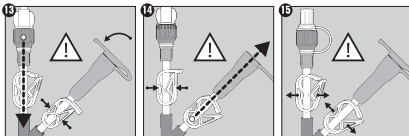

Informace pro ČR, přebalení a překlad informací poskytnutých výrobcem do českého jazyka:

Danone a.s., V parku 2294/2, 148 00 Praha 4 – Chodov. Infolinka: 800 110 001.

Ref. číslo: 624856

Přeloženo dne 21. 11. 2022 z originální etikety 200421_C a informací pro pacienta 200653_A.

NUT1237, SAP etikety: 191965